

TOKAISUN

燦

for Amenity Space

Clean &
Safety

マットレスの除菌・乾燥に

クリーンキーパー

Clean Keeper

医療機器品目番号：23B3X1000800001

乾燥能力を従来機の2倍にUP!

洗浄後のマットレスを1時間で除菌・乾燥処理できます。

施設内での感染防止に! 介護保険下でのサービス事業に!

処理対象物に合わせた、品物を傷めない処理設定をカスタマイズできます。

利用者はもちろん、作業者の安全を第一に。
人にやさしく
環境にやさしい

脱EOG
脱ホルマリン



- 対象は医療機器及びマットレス、フトン、毛布など一度に処理でき、清潔な寝具になります。
- 車椅子など庫内に入る介護用品を処理できます。
- 操作はボタンを押すだけ。どなたでも安全に安心して作業できます。
- ランニングコストが安く、リーズナブルな安定したサービスを提供できます。

TKC 東海機器工業株式会社



ISO9001 認証
JQA-QMS306
本社・工場



Aichi
Quality
認定番号 016



モノグラフ
ナゴヤ
NAGOYA
第1回 顕彰企業



女性にも、環境にもやさしい 簡単操作と楽々作業をお約束

加熱蒸気システム
(最高温度 110℃)

+ サンクリーンシャワーシステム
(抗菌剤自動噴霧システム)

+ 高温加熱システム
(最高温度 110℃)

のトリプル効果により、除菌能力をより一層確実なものとなりました。

特長

- 加熱蒸気システムで医療法のリネン・寝具類などの消毒基準に準じた処理ができます。
- 注目のサンクリーンシャワーシステムを装備。
ノズルから抗菌剤をスプレーし、長期間抗菌効果を保持します。
- 対象は医療機器及びマットレス、フトン、毛布など、一度にたくさん処理でき、清潔な寝具になります。
- 軽量台車のパイプが取り外しできるため、スプリングマットレスや車椅子も簡単に処理できます。
- 操作部はカラー液晶タッチパネルを搭載。
処理時間の設定などカスタマイズできます。
万一のトラブルもエラーメッセージを表示、どなたでも安心して使用できます。
- 加熱蒸気システム、抗菌クリーンシャワーシステム、高温加熱システムの選択はワンタッチ。
- ステンレス仕様で耐久性は抜群です。



スプレーノズル

全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。



カラー液晶タッチパネル

財団法人日本食品分析センターの試験データあり

仕様

型 式	MCM-3S	MCM-3W (スルータイプ)	RCM-3S	RCM-3W (スルータイプ)
処 理 方 式	加熱蒸気システム、クリーンシャワーシステム、高温加熱システム			
操 作 部	カラー液晶タッチパネル			
外 寸 法 (mm)	L2,186 × W1,376 × H1,500		L2,300 × W1,778 × H1,570	
重 量	550kg		740kg	
処 理 能 力	マットレス3枚 or フトン2枚 or 車椅子2台		マットレス5枚 or フトン4枚 or 車椅子4台 (オプションでマットレス6枚)	
標 準 処 理 時 間	60分 (昇温時間含む)			
熱 源	灯油 (オプションでLPG・都市ガス)			
燃 焼 機	オートガンタイプバーナー 2.5 ㍓/H		オートガンタイプバーナー 3.2 ㍓/H	
温 調	50℃～110℃ (1分毎に設定変更可能)			
電 源 (本 体)	単相 100V 15A			
電 源 (ボ イ ラ ー)	三相 200V 7kW		三相 200V 10kW	
必 要 蒸 気 量	10kg/h		15kg/h	
設 置 方 法	据置 機械室扉前面左			
構 造	SUSサンドイッチ構造			
オ プ シ ョ ン	台車仕様、追加パーテーション			

*機械の外観・仕様等は改良のため一部変更になる場合がありますのでご了承下さい。



東海機器工業株式会社

URL <http://www.tokaisun.com/>

●本社・工場

〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73番地

TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011

部品注文専用 FAX 0120-673139

●ご用命はサービスのゆき届いた当店へ

*機械の外観・仕様・価格等は改良のため一部変更になる場合がありますのでご了承下さい。

2016.02.5000AT



ISO9001 認証
JCA-QM5306

本社・工場

東北営業所/〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2-2-1 ☎022-349-4577(代) FAX022-349-4578
 東京営業所/〒338-0823 さいたま市桜区栄和1-4-7 ☎048-855-6031(代) FAX048-855-6157
 本社営業所/〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73 ☎0568-68-7111(代) FAX0568-68-7011
 大阪営業所/〒567-0023 大阪府茨木市西河原2-2-22-103 ☎072-621-0339(代) FAX072-621-0339
 中国営業所/〒733-0812 広島市西区己斐本町2-6-9 ☎082-273-0555(代) FAX082-273-0556
 九州営業所/〒816-0912 福岡県大野城市御笠川14-13-12 ☎092-503-2502(代) FAX092-503-2504